



LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ESPECIALES

AOC MÉXICO produce e importa gases de alta pureza para uso medicinal, siguiendo las más estrictas normas de seguridad, para garantizar las condiciones de calidad requeridas.


A través de su departamento especializado a cargo de ingenieros y técnicos experimentados en el área, planifica, diseña y construye sistemas de abastecimiento y redes centralizadas de distribución interna de gases para hospitales, centros médicos y clínicas, asegurando el mantenimiento y abastecimiento.

Las aplicaciones médicas más comunes se realizan en anestesia, unidad de cuidados intensivos, terapia respiratoria y reanimación.

Ejemplo de ello, es el oxígeno, el cual es usado para tratar o prevenir la hipoxia, la que se debe a una diversidad de causas, como las enfermedades pulmonares, shock, anemia, entre otras.

También su uso se ha ampliado a otros campos con la aparición de nuevas tecnologías como la cámara hiperbárica, donde son tratadas con hiperoxia infecciones por anaerobios (gangrenas), envenenamiento, terapia antitumoral, así como enfermedad de los buzos (síndrome de descompensación brusca).



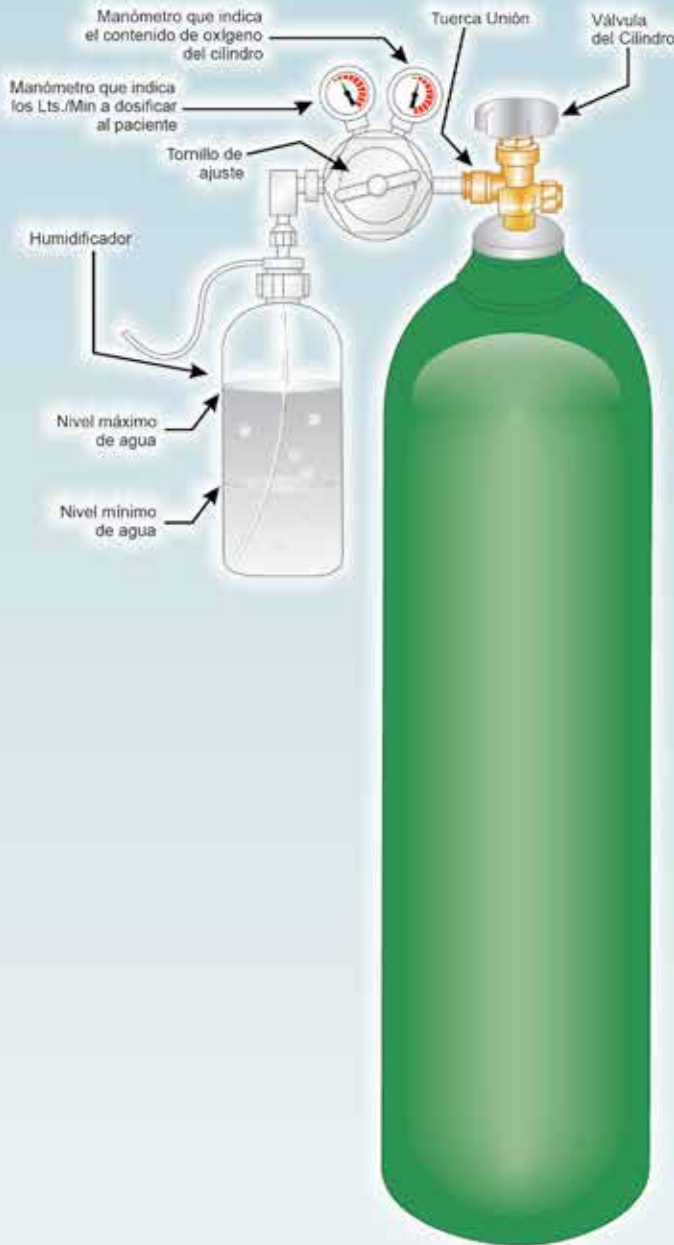

Reglas Básicas de Seguridad

- 1.- Fije el cilindro en algún lugar donde esté seguro, evitando se caiga o golpee.
 - No golpee el cilindro ni el equipo.
 - No coloque el cilindro cerca de la estufa o parrillas eléctricas, ni utilice enchufes o cables en mal estado.
 - No coloque el cilindro en áreas donde existe paso frecuente de personas, como pasillos y puertas, evite que los niños estén cerca o jueguen con el cilindro.
 - Cuando el paciente no use el oxígeno, abrir el tornillo de ajuste del regulador.
 - Cuando se tengan 2 o más cilindros de reserva, deberá proteger la válvula del regulador con el capuchón.
- 2.- Desprenda el sello de protección de la válvula y asegúrese que el cilindro no lleve grasa en cualquier parte del envase y evite tocar el equipo con algún tipo de grasa, aceite o cremas cosméticas en las manos.
- 3.- Después de haberse conectado el regulador abra el tornillo de ajuste antes de abrir la válvula del cilindro.
- 4.- Párese a un lado del regulador y abra lentamente la válvula, nunca se pare frente al regulador.
- 5.- Si usted nota alguna fuga de oxígeno en cualquier parte del equipo, no intente sellarla o taparla, simplemente cierre la válvula del cilindro y llame a su proveedor AOC.
- 6.- Utilice agua destilada o hervida en el humidificador entre el nivel máximo y mínimo; suministrar la cantidad de Lt/min recomendada por su médico.
- 7.- No fume en la habitación donde se suministra el oxígeno.
- 8.- No retire la etiqueta del cilindro.
- 10.- Solicite la reposición del cilindro cuando el manómetro del regulador marque 40kg/cm² o esté en la sección roja.

SUCURSALES

SUC. TALLER
Bld. Nido Lápiz Zona 14 # 2940
Cm. La Soledad
Saltillo, Coahuila
C.P. 25140
Tel: (844) 4100707
www.aoc.com.mx

SUC. AZOCLA
Carretera Presa de la Asunción # 1900
Colonia Residencial
Del Acuña, Coahuila
C.P. 25230
Tel: (877) 7711954
www.aoc.com.mx

SUC. MICHOTZINGY
Av. Jacalote # 2519
Col. San Jorge
Michotziny, N.L.
C.P. 64310
Tel: (81) 86477427
www.aoc.com.mx

SUC. MATIASRIVERA
Calle Guzman # 1150, Car. Av. Del Maestro
Colonia Balcones
Matamoros, Tamaulipas
C.P. 87410
Tel: (865) 1490796
www.aoc.com.mx

SUC. OROZQUIZ
Car. Matamorosa # 2747
Col. Nueva Esperanza
Ciudad Juárez, Chih., CP 32605
Carretera Guadalupe Valiente
C.P. 32604
Col. Juárez, Chih.
Tel: (656) 2588114 y 2588300
www.aoc.com.mx

SUC. BIRAPAZO
Bld. Fructosa Villa # 1514 B
Sanago, Pqs.
C.P. 34200
Tel: (838) 8308429
www.aoc.com.mx

SUC. TORREÓN
Calle 36 # 450
Col. Nuevo Tormenta
Torreón, Coahuila
C.P. 27060
Tel: (817) 3265111 y 7326141
www.aoc.com.mx

SUC. SAN VICENTE DE LOS CABALLEROS
Av. López Mateos # 201
Cm. La Esperanza
San Vicente de los Caballeros, N.L.
C.P. 66400
Tel: (81) 86477427
www.aoc.com.mx

SUC. REYNOSA
Bld. José Ma. Herrera # 400
Col. Primavera
Reynosa, Tamaulipas
C.P. 88550
Tel: (899) 9243190
www.aoc.com.mx

SUC. CHIHUAHUA
Av. Torrelago # 3302
Zona Industrial Noreste de Del
Chihuahua, Chih.
C.P. 31150
Calle 1ra. con Av. Agustín Melgar
Tel: (618) 4311025 y 4140967
www.aoc.com.mx

SUC. PARRAL
Av. Niños Héroes S/N Km 7 + 295
Carretera Villa Verde
Municipio del Panal, Chihuahua
C.P. 33825
Tel: (637) 5231303
www.aoc.com.mx

SUC. GUADALUPE
Av. Soledad Residencial # 2060
Colonia La Divina
Tehuacan, Tlaxcala
C.P. 45500
Tel: (511) 3800454

SUC. MONGOLVIA
Av. Industria # 1008
Col. Nueva Miravalle
Mantoloca, Coahuila
C.P. 25750
Tel: (866) 6313472
www.aoc.com.mx

SUC. GUADALUPE
Carretera a Reynosa Km. 10,
1922-A 016,
Colonia Colinas Treviño
Guadalupe, N.L.
C.P. 67700
Tel: (81) 86477427
www.aoc.com.mx

SUC. TAMPACO
Calle Benito Juárez # 774, esp. con
Osonofort
Col. Nueva Primavera
Tampico, Tamaulipas
C.P. 89318
Tel: (833) 2262512 y 2262113
www.aoc.com.mx

SUC. CUARTEMOC
Calle Eje Central # 3890, Bedroza # 4
Col. Barrio La Presa
Cd. Cuahuatlihuac, Chihuahua
C.P. 31510
Tel: (625) 134 41 03
www.aoc.com.mx

SUC. HERMANOS
Bld. Antonio Serrano # 85-A
Eje. Saffronville Campoy
Col. Nuevo Saffronville
Hermosillo, Sonora
C.P. 83125
Tel: (662) 2610017
www.aoc.com.mx

01-800-7770AOC • www.aoc.com.mx • servicioclientes@aoc.com.mx

